



# Scleroderma<sup>10</sup> IgG

Bestellnummer: SCL10DIV-24  
BlueDiver Protokoll: 02

## 1. VERWENDUNGSZWECK

BlueDiver Dot Scleroderma<sup>10</sup> IgG ist ein Immunodot Kit zum Nachweis (in humanen Seren) von IgG-Autoantikörpern gegen die folgenden Antigene: Scl-70, CENP-A, CENP-B, PM-Scl 100, PM-Scl 75, Ku, RNA Polymerase III, RNP 68kD/A/C, Th/To und Fibrillarin.

Dieser Kit dient zur Bestätigung von Mustern, die durch Immunfluoreszenz, der Screening- und Referenzmethode bei der Autoimmunität, erhalten wurden; der Kit ist ein Hilfsmittel für die Diagnose verschiedener Autoimmunerkrankungen (mehr Information zu den Autoantikörpern und den Autoimmunerkrankungen, siehe 11.5 Diagnostische Werte der Autoantikörper).

Der Test ist für eine große, routinemäßige Population bestimmt. Er ist ausschließlich für die professionelle Anwendung in klinischen Analyselabors bestimmt. Er ist ausschließlich als automatisierter Test vorgesehen und kann nur in einem BlueDiver Instrument Modell I oder II (im Folgenden *BDI I* bzw. *BDI II* genannt) verwendet werden.

Für eine Semi-quantifizierung der Testergebnisse ist die Verwendung des BlueScan-Scannersystems und der Dr Dot-Software erforderlich. Dieses System ist im BDI I nicht enthalten, wohl jedoch im BDI II (siehe Punkt 4).

## 2. TESTPRINZIP

Dieser Test und all seine Bestandteile sind für die Abarbeitung auf dem BDI I oder 2 bestimmt.

Der Test beruht auf dem Prinzip eines Enzym-Immunoassays. Die Teststreifen bestehen aus einer Membran, die auf einem Kunststoffträger fixiert ist. Während der automatischen Testdurchführung inkubiert das Gerät nacheinander die Streifen in den Kavitäten der gebrauchsfertigen Reagenzienkartuschen. Die Streifen werden zunächst mit verdünnten Patientenserum inkubiert. Sind humane Antikörper vorhanden, binden sie an die entsprechenden spezifischen Antigene auf der Membran. Ungebundene oder überschüssige Antikörper werden durch Waschen entfernt. Während der anschließenden Inkubation mit AP-konjugierten Antikörpern (Ziege) gegen humanes IgG bindet das Enzymkonjugat an die Antigen-Antikörper-Komplexe. Nach einem zweiten Waschvorgang zum Entfernen überschüssigen Konjugats inkubieren die Streifen in einer Substratlösung. Ist eine Enzymaktivität vorhanden, entwickeln sich purpurfarbene Dots auf den Membranstreifen. Die Intensität der Färbung ist direkt proportional zur Menge der Antikörper in der Probe.

Der Kit besteht aus 24 Einwegtests.

## 3. PACKUNGSGEHALT


**Vor Gebrauch bitte erst überprüfen, ob alle angegebenen Teile vorhanden sind und die Eigenschaften des Produkts mit den hier beschriebenen übereinstimmen!**

**Sollte irgendetwas fehlen oder beschädigt sein, den Kit bitte NICHT benutzen. In diesem Fall wenden Sie sich bitte an Ihren Verteiler.**


### 3.1 Bestandteile

| Streifen      | 3 x 8 Einheiten auf einem Kunststoffträger<br>einzeln brechbar; versiegelt im Aluminiumbeutel<br>Jeder Streifen ist für einmaligen Gebrauch bestimmt<br><br>12 Dots per Streifen:<br>1 positive Kontrolle (RC)<br>10 Antigene<br>1 negative Kontrolle (CO) | STREIFEN | KARTUSCHE |
|---------------|--|----------|-----------|
| Kartusche     | 24 Einheiten mit jeweils 7 Kavitäten; versiegelt   |          |           |
| Probendiluent | Position I, 1 x 1,4 mL (gelb)<br>enthält H <sub>2</sub> O • TBS • NaCl • Tween • BSA • Konservierungsstoff • Antischaumemulsion • Farbstoff  |          |           |
| Waschpuffer   | Position II, III, IV und VI, 4 x 1,4 mL (farblos)<br>enthält H <sub>2</sub> O • TBS • NaCl • Tween • Konservierungsstoff • Antischaumemulsion  |          |           |
| Konjugat      | Position V, 1 x 1,4 mL (rot)<br>enthält H <sub>2</sub> O • TBS • NaCl • KCl • MgCl <sub>2</sub> • AP-konjugiertes Ziege-Anti-human-IgG • Farbstoff • Konservierungsstoff • Antischaumemulsion  |          |           |
| Substrat      | Position VII, 1 x 1,4 mL (hellgelbe Lösung)<br>enthält H <sub>2</sub> O • Konservierungsstoff • MgCl <sub>2</sub> • TBS • NBT • BCIP • NBT-Stabilisator  |          |           |

### STREIFEN

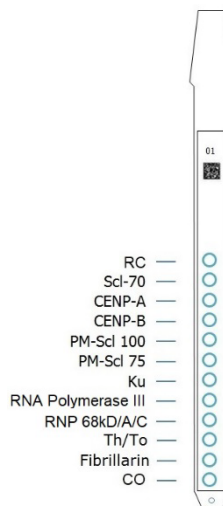

### KARTUSCHE

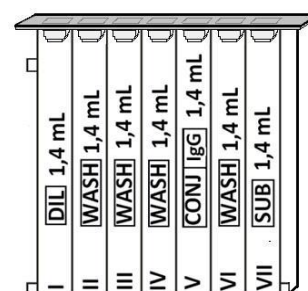

### Dokumente:








Arbeitsanleitung (IFU),  
Analysezertifikat (CoA)

Abkürzungen in alphabetischer Reihenfolge:

AP = alkalische Phosphatase; BCIP = Brom-Chlor-Indolyl-Phosphat; BSA = Rinderserumalbumin; KCl = Kaliumchlorid; MgCl<sub>2</sub> = Magnesiumchlorid; NaCl = Natriumchlorid; NBT = Nitroblau Tetrazolium; TBS = TRIS-gepufferte Kochsalzlösung

Weitere Informationen über die Zusammensetzung und Konzentration der verwendeten Wirkstoffe entnehmen Sie bitte den auf Anfrage oder unter [www.d-tek.be](http://www.d-tek.be) erhältlichen MSDS.

### Symbole auf den Etiketten der Kits


|   |   |   |  |
|---|---|---|--|
|    | <p>Attention : consult instructions for use<br/>         Attenzione : consulti le istruzioni per uso<br/>         Achtung :Gebrauchsanwendung beachten<br/>         Attention : consulter le mode d'emploi<br/>         Atención : consultar las instrucciones<br/>         Atencão : consultar instruções para uso<br/>         Προσοχή : Συμβουλευτείτε τις οδηγίες χρήσης</p>                    | <b>STRIP</b>  | <p>Coated strip<br/>         Strips rivestita<br/>         Streifen<br/>         Bandelette<br/>         Tira<br/>         Tira<br/>         Στιγμάτων</p>   |
| <b>IVD</b>  | <p>In vitro diagnostic medical device<br/>         Dispositivo medico diagnostico in vitro<br/>         Zur medizinischen diagnostischen Anwendung in vitro<br/>         Dispositif médical de diagnostic in vitro<br/>         Dispositivo médico para uso diagnostico in vitro<br/>         Dispositivo médico para uso diagnostico in vitro<br/>         Ιατρικό υλικό για διάγνωση In Vitro</p> |    | <p>CE Mark<br/>         Marcatura CE<br/>         CE-Kennzeichnung<br/>         Marquage CE<br/>         Marca CE<br/>         Marcação CE<br/>         μονογράφιση CE</p>   |
|    | <p>To be stored from 2°C to 8°C<br/>         Conservazione da 2 – 8°C<br/>         bei 2°C bis 8°C lagern<br/>         A conserver de 2°C à 8°C<br/>         Almacenar a 2 - 8°C<br/>         Armazenar a 2 – 8°C<br/>         Αποθηκεύστε στους 2 έως 8°C</p>  |    | <p>For ... uses<br/>         Per ... dosaggi<br/>         Für ... Anwendungen<br/>         Pour ... utilisations<br/>         Para ... usos<br/>         Para ... utilização<br/>         για ... χρήσεις</p>  |
| <b>LOT</b>  | <p>Batch Number<br/>         Lotto numero<br/>         Chargennummer<br/>         Désignation du lot<br/>         Denominacion de lote<br/>         Número do lote<br/>         Κωδικός</p>   | <b>REF</b>  | <p>Code<br/>         Codice<br/>         Artikelnummer<br/>         Référence<br/>         Código<br/>         Código<br/>         Κωδικός</p>   |
|  | <p>Use by (last day of the month)<br/>         Utilizzare prima del (ultimo giorno del mese)<br/>         Verwendbar bis (letzter Tag des Monats)<br/>         Utiliser avant (dernier jour du mois indiqué)<br/>         Estable hasta (usar antes de ultimo dia del mes)<br/>         Data limite para utilização (ultimo dia do mês)<br/>         Χρήση έως (τελευταία ημέρα του μήνα)</p>       |  | <p>To be protected from direct sunlight<br/>         Proteggere dalla luce<br/>         Vor Licht schützen<br/>         Protéger de la lumière<br/>         Proteja de la luz<br/>         Proteger da exposição à luz<br/>         Προστατεύετε τον αντιδραστήριο</p> |
| <b>CART</b>   | <p>Cartridge<br/>         Cartuccia<br/>         Patrone<br/>         Cartouche<br/>         cartucho<br/>         cartucho<br/>         κασέτα</p>   |  | <p>Manufactured by<br/>         Fabricado da<br/>         Hergestellt von<br/>         Fabriqué par<br/>         Fabricado por<br/>         Fabricado por<br/>         Κατασκευάζεται από την</p>  |

### 3.2 Im Kit verwendete Antigene

|                    |  |
|--------------------|--|
| Scl-70             | DNA-Topoisomerase I (rekombinant, human, exprimiert in Baculovirus-infizierten Sf9-Zellen)   |
| CENP-A             | Zentromerprotein A (rekombinant, human, exprimiert in Baculovirus-infizierten Sf9-Zellen)  |
| CENP-B             | Zentromerprotein B (rekombinant, human, exprimiert in Baculovirus-infizierten Sf9-Zellen)  |
| PM-Scl 100         | Polymyositis-Sklerodermie-Antigen (100 kD Untereinheit) (rekombinant, human, exprimiert in Baculovirus-infizierten Sf9-Zellen)                             |
| PM-Scl 75          | Polymyositis-Sklerodermie-Antigen (75 kD Untereinheit) (rekombinant, human, exprimiert in Baculovirus-infizierten Sf9-Zellen)                              |
| Ku                 | Regulatorische Untereinheit der DNA-abhängigen Proteinkinase (70/80 kD Heterodimer) (rekombinant, human, exprimiert in Baculovirus-infizierten Sf9-Zellen) |
| RNA Polymerase III | 155 kD Untereinheit (RPC 155) des RNA Polymerase III-Komplexes (rekombinant, human, exprimiert in E.coli)  |
| RNP 68kD/A/C       | Gemisch aus 68 kD, A- und C-Proteinen aus snRNP-Partikeln (rekombinant, human, exprimiert in Baculovirus-infizierten Sf9-Zellen)                           |
| Th/To              | RNase P nuklearer Proteinkomplex, Untereinheit Rpp 25 (rekombinant, human, exprimiert in E.coli)   |
| Fibrillarin        | Fibrillarin-Protein (rekombinant, human, exprimiert in E.coli)   |

#### 4. ERFORDERLICHE (NICHT ENTHALTENE) MATERIALIEN

##### BDI I:

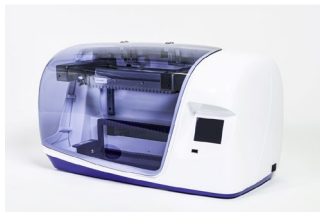

**BlueScan und  
Dr Dot Software:**



Das BDI I ist ein Gerät, das die verschiedenen Schritte der Inkubation und des Waschens der Immunodot-Streifen von D-tek durchführt, von der Einlagerung der Probe bis zur abschließenden Farbentwicklung. Die maximale Kapazität liegt bei 24 Streifen, die gleichzeitig inkubiert werden. Jeder Streifen ist mit einer Kartusche assoziiert, die die verschiedenen Reagenzien enthält, die die Durchführung des Tests ermöglichen. Das BlueDiver-Gerät ist mit einem Barcode-Leser ausgestattet, der die korrekte Zuordnung eines Streifens zu seiner Kartusche kontrolliert.

Eine vorherige Schulung wird dringend empfohlen (wenden Sie sich an Ihren Händler). Bitte vor Benutzung das Benutzerhandbuch lesen!


Der BlueScan und die Dr Dot Software sind für das Ablesen von Testergebnissen der D-tek Immunodotstreifen bestimmt. Die Dr Dot Software und der BlueScan Scanner müssen in Kombination verwendet werden.

Der Scanner wurde speziell für das Einlesen der Streifen mit "BlueDiver"-Design entwickelt. Auf der Grundlage des Bildes der gescannten Streifen wandelt die Dr Dot-Software die Intensität jedes Punktes/jeder Linie in einen numerischen Wert um (die numerische Skala basiert auf einer Grauskala). Die Ergebnisse werden in willkürlichen Einheiten (von 0-100) ausgedrückt. Es können 1-24 Streifen gelesen werden.

Eine vorherige Schulung wird dringend empfohlen (wenden Sie sich an Ihren Händler).

Bitte wenden Sie sich an Ihren Händler, um die neueste Version der Dr Dot-Software zu erhalten. Bitte lesen Sie das Benutzerhandbuch, bevor Sie den BlueScan und die Dr Dot Software benutzen!

##### BDI II:

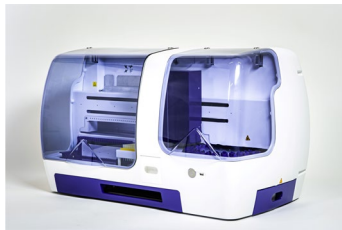

Das BDI II ist ein Gerät, das die verschiedenen Schritte der Probenpipettierung, der Inkubation, des Waschens, Trocknens und Ablesens der Immunodot-Streifen von D-tek durchführt, vom Einlegen des Probenröhrchens bis zum endgültigen Ablesen der Streifen. Die maximale Kapazität des BDI II liegt bei 24 Streifen, die gleichzeitig inkubiert werden. Jeder Streifen ist mit einer Kartusche assoziiert, die die verschiedenen Reagenzien enthält, die die Durchführung des Tests ermöglichen. Das BDI II ist mit einem Barcode-Leser ausgestattet, der die korrekte Zuordnung eines Streifens und seiner Kartusche kontrolliert. Das BDI II umfasst das BlueScan- und das Dr Dot-Lesesystem. Eine vorherige Schulung ist erforderlich (wenden Sie sich an Ihren Händler). Bitte vor Benutzung das Benutzerhandbuch lesen!

**Andere Materialien:** Mikropipetten, Absorptions- und/oder Filterpapier, Schutzausrüstung (siehe Punkt 6).

#### 5. LAGERUNG

Der Testkit muss während seiner gesamten Gültigkeitsdauer bei einer Temperatur zwischen +2°C und +8°C gelagert werden (siehe Verfallsdatum auf dem Kit). Nicht einfrieren.

Nach dem ersten Öffnen des Kits müssen unbenutzte Reagenzienkartuschen bei 2-8°C und vorzugsweise in der Originalverpackung des Kits vor (Sonnen-)Licht geschützt gelagert werden.

Unbenutzte Teststreifen müssen in die mitgelieferten Beutel zurückgelegt, versiegelt und bei 2-8°C gelagert werden, vorzugsweise in der Originalverpackung des Kits. Bei ordnungsgemäßer Lagerung sind alle Bestandteile des Testkits bis zum angegebenen Verfallsdatum haltbar.

#### 6. VORSICHTSMASSNAHMEN

1. Alle Reagenzien sind nur für In-vitro diagnostische Zwecke und professionellen Gebrauch bestimmt und dürfen nur von Fachpersonal verwendet werden.
2. Die Reagenzien des Kits gelten als nicht gefährlich, da die Konzentrationen der potentiell gefährlichen Chemikalien unter den von den europäischen Vorschriften festgelegten Schwellenwerten liegen (siehe Sicherheitsdatenblatt). Dennoch enthält das Produkt Konservierungsstoffe, die (in der gegebenen Konzentration) leicht umweltbelastende Eigenschaften haben oder eine Hautsensibilisierung verursachen können. Daher sollte der Kontakt mit der Haut, den Augen oder Schleimhäuten vermieden werden. Wie bei jeder Chemikalie, die spezifische Gefahren enthält, sollte(n) das Produkt/die Produktkomponenten nur von qualifiziertem Personal und mit den erforderlichen Vorsichtsmaßnahmen gehandhabt werden.
3. Patientenproben sollten so behandelt werden, als ob sie Infektionskrankheiten übertragen könnten; sie benötigen daher einen geeigneten Schutz (Handschuhe, Laborkittel, Schutzbrille). In jedem Fall sollte die GLP mit allen geltenden allgemeinen oder individuellen Sicherheitsvorschriften angewendet werden.
4. Entsorgung: Patientenproben, inkubierte Teststreifen und benutzte Kartuschen sollten als infektiöser Abfall behandelt werden. Die Pappe und die andere Behälter müssen nicht separat gesammelt werden, sofern nicht anders in behördlichen Vorschriften angegeben.

#### 7. EMPFEHLUNGEN

1. D-tek und seine autorisierten Verteiler können nicht für Schäden verantwortlich gemacht werden, die indirekt oder durch eine Änderung/Modifikation des angegebenen Verfahrens, eine unsachgemäße Verwendung des Kits und/oder die Verwendung eines unvollständigen oder beschädigten Kits, verursacht wurden. Der Gebrauch dieses Kits ist nur qualifiziertem technischen Personal vorbehalten.
2. Die Verantwortung von D-tek ist in jedem Fall auf den Ersatz des Kits beschränkt.
3. Im Falle eines ernsthaften Zwischenfalls (Verletzung, Verschlechterung der Gesundheit oder Tod) mit diesem IVD-Kit, melden Sie es bitte sofort dem Hersteller (siehe untenstehende Adresse) und der zuständigen Behörde Ihres Landes.

#### 8. ENTNAHME, HANDHABUNG UND LAGERUNG DER PROBEN

Der Test darf nur an kürzlich entnommenen Serum-Proben durchgeführt werden! Seren mit Partikeln sollten bei niedriger Geschwindigkeit zentrifugiert werden. Proben können in trockenen Röhrchen abgenommen werden. Die Verwendung eines Pools verschiedener Seren ist zu vermeiden, da dies zu einer Diskrepanz in den Ergebnissen führen kann (siehe Punkt 10.4). Nach der Abtrennung sollten die Serumproben sofort verwendet oder aliquotiert und bei 2-8 °C (für eine mehrtägige Lagerung) oder bei -20 °C eingefroren (für eine längere Lagerung) gelagert werden. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen der Proben müssen vermieden werden.

## 9. TESTVERFAHREN

### **GRUNDLEGENDE INFORMATIONEN, HANDHABUNG UND TIPPS:**

#### **TESTPRINZIP:**

Nachdem Streifen und Reagenzienkartuschen manuell geladen wurden, werden die Inkubations- und Waschschritte automatisch vom BDI ausgeführt. Durch kontinuierliches Auf- und Abbewegen der Streifen in den Kavitäten der gebrauchsfertigen Reagenzienkartuschen sorgt das BDI für eine effiziente Zirkulation der Flüssigkeiten über die Streifen. Der gesamte Testablauf erfolgt bei Raumtemperatur.

#### **Beschreibung der STREIFEN:**

**Die reaktive (Vorder) Seite** der Streifen ist mit Antigenen beschichtet, die als schwach blaue Dots erscheinen. Diese Färbung stellt sicher, dass alle Antigene richtig auf die Membran aufgebracht sind. Sie verschwindet im weiteren Testverlauf. Auf der Vorderseite des Streifens befinden sich außerdem eine Streifennummer und ein 2-dimensionales Barcode-Quadrat zur Rückverfolgbarkeit der Streifen nach Entnahme aus dem BDI am Ende des Testverlaufs.



**Die nicht-reaktive (Rück) Seite** der Streifen weist sowohl alphanumerische als auch Strichbarcode-Informationen auf. Anhand dieser kann das BDI Streifentypen und Chargennummern identifizieren.



Bevor der automatische Prozess startet, müssen die Streifen von Hand in den dafür vorgesehenen Streifenträger eingesetzt werden (siehe Testvorbereitung unter Pkt. 9.1 und 9.2 hier nach). Während dieses Vorgangs auf keinen Fall die Membranzonen der Streifen mit den Fingern berühren. Tragen Sie immer Laborhandschuhe und halten Sie die Streifen nur an den vorgesehenen Kunststoffteilen.

#### **Beschreibung der REAGENZIENKARTUSCHEN: (siehe Bild auf Seite 1)**

Die Reagenzienkartuschen bestehen aus 7 verschiedenen Kavitäten, die mit gebrauchsfertigen Reagenzien befüllt sind. Die Kartuschen sind versiegelt (Reagenzienkavitäten sind hermetisch voneinander getrennt); diese Versiegelung muss vor Beginn des Tests entfernt werden. Nach dem Öffnen die Kartuschen mit Sorgfalt handhaben, um die Reagenzien nicht zu verschütten und Kavitäten nicht zu kontaminieren.

Die Rückseite der Kartuschen ist zur Identifikation des Kartuschentypen und der Charge mit alphanumerischen und Strichbarcode-Informationen versehen.

Bevor der automatische Prozess startet, müssen die Kartuschen von Hand in den dafür vorgesehenen Kartuschenhalter gesteckt werden (siehe Testvorbereitung unter Pkt. 9.1 und 9.2 hier nach). Die Vorderseite der Kartuschen hat eine dreieckige Unterseite, die Rückseite jeweils zwei quadratische Kunststoffkanten (unten und oben), die eine sichere Positionierung und Ausrichtung in der Halterung ermöglichen.

#### **Beschreibung der KONTROLLEN:**

**Die Positivkontrolle oder RC (Reaktionskontrolle)** besteht aus einem Protein, das alle in der Testprobe vorhandenen Immunglobuline fixiert. Wenn der Test korrekt durchgeführt wurde, zeigt diese Kontrolle am Ende des Tests eine Färbung (mit einer Intensität, die von der effektiven Konzentration der Immunglobuline in der Probe abhängt).

Das Fehlen einer Färbung dieses Punktes am Ende des Tests kann ein Hinweis darauf sein, dass die Probe nicht auf den Streifen pipettiert wurde (siehe 10.4 Fehlerbehebung).

**Die Negativkontrolle oder CO (Cut-Off-Kontrolle)** besteht aus einem Protein, das mit dem enzymatischen Substrat und mit bestimmten Bestandteilen der Probe reagiert. Bei korrekter Testdurchführung erscheint diese Kontrolle am Ende des Tests gefärbt, wobei ein von der Kinetik des Substrats und den Eigenschaften der Probe abhängiges Signal ausgegeben wird. Die Intensität dieser Kontrolle dient als Schwellenwert für die Auswertung der Ergebnisse (siehe Punkt 10 AUSWERTUNG DER ERGEBNISSE).

#### **STREIFEN/KARTUSCHEN Paare**

Streifen und Kartuschen aus dem gleichen Testkit haben die gleiche Charge und gehören zusammen. Verwenden Sie auf keinen Fall einen Streifen und eine Kartusche aus verschiedenen Chargen, da dies als ungültige Einstellung durch das BDI erkannt wird und der Prozess gestoppt wird.

Haben Streifen und Kartusche die gleiche Charge, kann das Gerät auch Streifen und Kartuschen aus verschiedenen Kits verarbeiten. Allerdings können nur Kits mit der gleichen Protokoll-Nummer (gleiche Inkubationszeit und Sequenz) zusammen in einem Lauf abgearbeitet werden (die Protokoll-Nummer finden Sie unter der Bestellnummer auf der ersten Seite).

### 9.1 Testvorbereitung auf BDI I

Bevor Sie das BDI I verwenden, lesen Sie bitte die dem Gerät beiliegende Gebrauchsanweisung!

- Alle Kitkomponenten vor Gebrauch auf Raumtemperatur (18 °C bis 25 °C) bringen.
- Eine Arbeitsliste (entweder mittels Dr Dot-Software oder extern) sollte erstellt werden, um die Beladung und richtige Zuordnung der Streifen, Kartuschen und Patientenproben zu gewährleisten.
- Stellen Sie sicher, dass der Kartuschenhalter korrekt im BDI befestigt ist.
- Stellen Sie sicher, dass das BDI I angeschlossen ist.

Die folgenden Punkte beschreiben Beladung und Vorbereitung des BDI I mit Teststreifen, Reagenzienkartuschen und Patientenproben vor Testbeginn. Für detaillierte Informationen oder im Falle eines Problems bezüglich der unten aufgeführten Schritte greifen Sie bitte auf das Nutzungshandbuch des BDI I zurück.

1. Das BDI I einschalten und einige Sekunden warten, bis das Datum und die Uhrzeit auf dem Touchscreen angezeigt werden.
2. Datum und Uhrzeit durch Drücken der Taste **V** auf dem Touchscreen bestätigen. (Bei Erstbenutzung oder für Reset bitte auf das Nutzungshandbuch des BDI I zurückgreifen) → Es wird **"Initialisieren?"** auf dem Bildschirm angezeigt.
3. Initialisierung durch Drücken der Taste **V** auf dem Touchscreen bestätigen → Der horizontale Arm des Gerätes bewegt sich automatisch nach vorne, um eine zentrale Position (Stand-by) einzunehmen → **"Streifen laden (24)"** wird auf dem Bildschirm angezeigt.
4. (Bitte hier weder die Streifenanzahl eingeben noch bestätigen). Den Streifenträger aus dem Trägerarm herausnehmen, indem Sie ihn vorsichtig nach oben drücken; nun den Streifenträger mit den zu testenden Streifen bestücken. Bitte halten Sie den Streifenträger mit der nummerierten Seite nach oben (offene Position), und setzen Sie die Streifen mit der nummerierten (reaktiven) Seite nach oben ein. Der obere Kunststoffteil (Zunge) rutscht in die vorgesehene Bohrung des Streifenträgers. Durch leichten Druck sicherstellen, dass die Kunststoffzunge das untere Ende der Bohrung erreicht hat.

#### **Achtung:**



- Die Beladung der Streifen immer in der 1. Position des Streifenträgers (linke Seite) beginnen und keine Leerräume zwischen den Streifen lassen!
  - Nach vollständiger Beladung des Streifenträgers bitte visuell die vertikale, horizontale und seitliche Ausrichtung der Streifen überprüfen. Eine offensichtliche Fehlausrichtung sollte durch erneutes Beladen des Streifenträgers korrigiert werden.
  - Etwaige Plastikteilchen können nach dem Abbrechen in individuelle Streifen übrigbleiben, was das Verarbeiten im BDI I und/oder das Lesen mit dem BlueScan beeinträchtigen könnte; diese Plastikteilchen sollten mit einer Schere entfernt werden.
5. Den Streifenträger in seine Position auf dem Trägerarm zurücksetzen, indem er vorsichtig von oben nach unten gedrückt wird.
  6. Die Anzahl der eingesetzten Streifen mit dem Aufwärts- und Abwärtspeil einstellen.
  7. Die Anzahl der eingesetzten Streifen durch Drücken der Taste **V** auf dem Touchscreen bestätigen → der horizontale Arm bewegt sich automatisch nach hinten und bleibt über den viereckigen Öffnungen, die hinten auf dem Kartuschenhalter angebracht sind, stehen → **"Ausrichtung prüfen"** wird auf dem Touchscreen angezeigt.
  8. Mit der "JOG"-Funktion auf dem Bildschirm die korrekte Ausrichtung der Streifen überprüfen: einen leichten Druck auf dem Abwärtspeil des Touchscreens aufrechterhalten, bis die Streifen ihre jeweilige Ausrichtungsöffnung auf dem Kartuschenhalter passieren. Ist alles richtig justiert, berühren die Streifen nicht die Umrisse der Ausrichtungsöffnung.  
**Achtung:**  
bei schlechter Justierung (Kontakt der Streifen mit den Umrissen der Ausrichtungsöffnung) bitte auf das Nutzungshandbuch des BDI I zurückgreifen.
  9. Bestätigung der korrekten Ausrichtung der Streifen durch Drücken der Taste **V** auf dem Touchscreen → das BDI I senkt die Streifen vollständig in die Ausrichtungsöffnung und liest die Barcodes der Streifen → hat das Gerät die Barcodes vollständig gelesen, erscheint **"Kartuschen laden"** auf dem Touchscreen.  
**Achtung:**  
kann das Gerät einen oder mehrere Barcodes der Streifen nicht lesen, erscheint ein blinkendes LED-Licht an der entsprechenden Position. Bitte greifen Sie zur Problembeseitigung auf das Nutzungshandbuch des BDI I zurück.
  10. Die Reagenzkartuschen entsiegeln und sie unter ihre entsprechenden Streifen in die vorgesehenen Einkerbungen der Kartuschenhalterung stellen.
  11. Die komplette Beladung durch Drücken der Taste **V** auf dem Touchscreen bestätigen → das BDI I liest die Barcodes der Kartuschen und prüft gleichzeitig, ob die entsprechenden (richtigen) Streifen vorhanden sind → nach vollständigem Einlesen der Barcodes wird die Anzahl der Streifen auf dem Bildschirm angezeigt.  
**Achtung:**  
kann das Gerät einen oder mehrere Barcodes der Kartuschen nicht lesen, oder falls eine falsche Streifen-/Kartuschen-Kombination erkannt wird, erscheint ein blinkendes LED-Licht an der entsprechenden Position. Bitte greifen Sie zur Problembeseitigung auf das Nutzungshandbuch des BDI I zurück.
  12. Die Anzahl der Streifen durch Drücken der Taste **V** auf dem Touchscreen bestätigen → die mittels Barcodes identifizierte Protokoll-Nummer wird auf dem Bildschirm (**Protokoll-ID xx.**) angezeigt
  13. Die Protokoll-Nummer durch Drücken der Taste **V** auf dem Touchscreen bestätigen → **"Bitte Haube schließen."** wird auf dem Bildschirm angezeigt.
  14. Die Haube des BDI I schließen und das Schließen durch Drücken der Taste **V** auf dem Touchscreen bestätigen → das BDI I startet mit einem ersten Waschschrift (Vorbehandlung der Streifen): die Streifen inkubieren für 1 Minute in der 2. Kavität. → Nach Beendigung dieses Schrittes wird **"Bitte Haube öffnen."** auf dem Touchscreen angezeigt
  15. Die Haube des BDI I öffnen und das Öffnen durch Drücken der Taste **V** auf dem Touchscreen bestätigen → der horizontale Arm bewegt sich automatisch nach vorne und schwingt die Streifen in Schrägstellung nach vorne → **"Streifen trocknen"** erscheint auf dem Bildschirm.
  16. Saugfähiges Papier nehmen und die Flüssigkeit von der Probenkavität am Ende des Kunststoffträgers vorsichtig abtupfen
  17. Das Trocknen durch Drücken der Taste **V** auf dem Touchscreen bestätigen → **"Proben auftragen"** wird auf dem Bildschirm angezeigt.
  18. 10 µl Patientenserum in die Probenkavität des Kunststoffträgers pipettieren.  
*NB: Die 10µl Patientenserum können (falls bevorzugt) auch direkt in den Probendiluent (Kavität I der Kartusche) einpipettiert werden. Diese Operation kann jederzeit nach Öffnen der Kartuschen (Punkt 9.1.10) durchgeführt werden.*
  19. Die Haube des BDI I schließen und das Schließen durch Drücken der Taste **V** auf dem Touchscreen bestätigen → das Gerät startet den Test automatisch und die Schritte des Protokolls werden ausgeführt (siehe Punkt 9.3). Nach Beendigung des Testablaufs hält der Streifenträger in einer Zentralposition (Stand-by) inne, um eine einfache Handhabung des Streifenträgers zu ermöglichen. Das Gerät gibt einen Signalton und **"Test beendet"** wird auf dem Bildschirm angezeigt.
  20. Mit saugfähigem Papier vorsichtig die Restflüssigkeit von der Probenkavität entfernen. Streifen 30 Minuten trocknen lassen und Ergebnisse auswerten. Achtung: Das Auswerten muss innerhalb von 24 Stunden nach Testablauf erfolgen. Achtung: bei Gebrauch des BlueScanners, bitte die abgearbeiteten Streifen im Streifenträger belassen.

#### DATENREGISTRIERUNG

Das Testprotokoll kann man durch Drücken des USB-Stick-Symbols herunterladen, indem man den Hinweisen auf dem Bildschirm folgt. (Insert USB → Writing USB → Remove USB)

Dieser Schritt ist nicht zwingend erforderlich, wird aber dringend für die Rückverfolgbarkeit und zur Dokumentation empfohlen.

### 9.2 Testvorbereitung auf BDI II

Bevor Sie das BDI II verwenden, lesen Sie bitte die dem Gerät beiliegende Gebrauchsanweisung!

- Alle Kitkomponenten vor Gebrauch auf Raumtemperatur (18 °C bis 25 °C) bringen.
- Alle vorbereitenden Schritte, die ein Eingreifen des Bedieners erfordern, werden im Benutzerbildschirm des BDI II deutlich erklärt. Den Angaben, die der Benutzer bei der Probenidentifizierung eingegeben hat, entsprechend, zeigt das BDI II die Anzahl und Art der durchzuführenden Tests auf.  
So wird der Benutzer durch alle Schritte begleitet, vom Eingeben der zu testenden Proben und Kits bis hin zur endgültigen Auswertung der Ergebnisse. Achtung: Bitte daran denken, die Reagenzkartuschen vor dem Einsetzen zu öffnen!

### 9.3 Testverlauf (Protokoll 02 für alle D-tec Immunodot-Kits auf BDI I und BDI II):

| Schritt | Beschreibung   | Arbeitszeit |
|---------|--|-------------|
| 01.     | Die Streifen werden in der 1. Kavität der Kartusche inkubiert ( <i>Probendiluent</i> ). Durch den Kontakt mit Flüssigkeit und durch Auf-und Abbewegung des Streifens werden die vorpipettierten Patientenproben (Pkt. 9.1.18) von der Probenkavität gelöst und im Probendiluent freigesetzt. | 30 min      |
| 02.     | Der Streifenträger bewegt sich nach vorne, und die Streifen inkubieren in der 2. Kavität ( <i>Waschpuffer</i> )  | 2 min       |
| 03.     | Der Streifenträger bewegt sich nach vorne, und die Streifen inkubieren in der 3. Kavität ( <i>Waschpuffer</i> )  | 2 min       |
| 04.     | Der Streifenträger bewegt sich nach vorne, und die Streifen inkubieren in der 6. Kavität ( <i>Waschpuffer</i> )  | 2 min       |
| 05.     | Der Streifenträger bewegt sich nach hinten, und die Streifen inkubieren in der 5. Kavität ( <i>Konjugat</i> )  | 10 min      |
| 06.     | Der Streifenträger bewegt sich nach hinten, und die Streifen inkubieren in der 4. Kavität ( <i>Waschpuffer</i> )   | 2 min       |
| 07.     | Der Streifenträger bewegt sich nach hinten, und die Streifen inkubieren in der 3. Kavität ( <i>Waschpuffer</i> )   | 2 min       |
| 08.     | Der Streifenträger bewegt sich nach hinten, und die Streifen inkubieren in der 2. Kavität ( <i>Waschpuffer</i> )   | 2 min       |
| 09.     | Der Streifenträger bewegt sich nach vorne, und die Streifen inkubieren in der 7. Kavität ( <i>Substrat</i> )   | 10 min      |
| 10.     | Der Streifenträger bewegt sich nach hinten, und die Streifen inkubieren in der 6. Kavität ( <i>Waschpuffer</i> )   | 2 min       |

### 10. AUSWERTUNG DER ERGEBNISSE

Für *BDI I*: eine visuelle (qualitative) Auswertung der Ergebnisse ist möglich, jedoch wird für mehr Präzision und für eine semi-quantitative Auswertung generell die Verwendung des BlueScan-Scanners und der Dr Dot-Software empfohlen.

Für *BDI II*: die semi-quantitative Auswertung der Ergebnisse wird systematisch am Ende des Tests durchgeführt.

**WICHTIGER HINWEIS:** Die Positivität aller Parameter dieses Kits ist NICHT möglich und der Test ist in diesem Fall nicht gültig. Zur Diagnosestellung muss ein zusätzlicher Test durchgeführt werden

#### 10.1. Qualitative Auswertung

- Den Streifenträger aus dem BDI nehmen und die Streifen aus dem Streifenträger entnehmen.
- Die Streifen mit der reaktiven Seite nach oben auf die markierten Felder der Diver-Interpretations-Vorlage legen, die zusammen mit dem Kit mitgeliefert wird. Sie zeigt die jeweiligen Positionen der verschiedenen Antigene und Kontrollen auf der Membran an.
- Der erste obere Dot (Positivkontrolle) muss bei allen Patienten positiv sein.  
*Nur ein eindeutig gefärbter Positivkontrolldot gewährleistet, dass Ihre Resultate gültig sind und der Test richtig abgelaufen ist bzw. die Einzelkomponenten des Kits nicht beeinträchtigt waren. Ist der erste obere Dot nicht gefärbt, ist der Test ungültig und kann nicht ausgewertet werden.*
- Die **spezifischen Antigendots** mit dem **negativen Kontrolldot** (immer der letzte Dot) vergleichen. Die Farbintensität der Antigendots ist direkt proportional zum Titer des spezifischen Antikörpers in der Patientenprobe.  
*Die Farbintensität der Negativkontrolle ist von verschiedenen Faktoren abhängig. Unter optimalen Bedingungen und sofern die Probe frei von störenden Matrixeffekten ist, kann der negative Kontrolldot u.U. fast farblos sein. Im Gegensatz dazu weisen stark gefärbte negative Kontrolldots auf einen hohen Anteil unspezifischer Bindung in der Probe hin.*

#### **POSITIVES ERGEBNIS:**

Eine Probe ist für einen spezifischen Antikörper positiv, wenn die Farbintensität des zugehörigen Antigendots sichtbar stärker ist als die Intensität des negativen Kontrolldots.

#### **NEGATIVES ERGEBNIS:**

Eine Probe ist für einen spezifischen Antikörper negativ, wenn die Farbintensität des entsprechenden Antigendots schwächer oder gleich stark wie die Intensität des negativen Kontrolldots ist.

NB: Die schwache Färbung eines Antigendots, wenn sie der Intensität des negativen Kontrolldots mehr oder weniger entspricht, kann fürs Auge schwer deutbar sein. In solchen Fällen ist die Benutzung des Dr Dot Software und Scanning Systems (siehe 10.2) für akkuratere Auswertung von Vorteil.

#### 10.2 Semi-Quantifizierung der Ergebnisse: Verwendung der Dr Dot-Software und des Scanning-Systems

Der BlueScan-Scanner ist ein speziell für das Lesen von D-tec-Immunodot-Streifen entwickeltes System. Er ermöglicht ein präzises und einfaches Einführen der Teststreifen.

Die Dr Dot Software ermöglicht eine Semi-Quantifizierung der Ergebnisse. Ausgehend von gescannten Bildern wird jedes Ergebnis in Grauwerten quantifiziert und mit der im BlueScan Cover integrierten Referenzskala verglichen.

Diese Graustufen-Intensitäten werden transformiert und in Arbiträren Einheiten (*Arbitrary Units (AU)*, von 0 bis 100) wiedergegeben; die arbiträren Einheiten werden gemäß der folgenden Umrechnungsformel, ausgehend von den Intensitäten der auf dem Streifen vorhandenen Kontrollen (RC und CO, siehe Punkt 9), berechnet:

$$\text{Resultat von Antigen X (AU)} = \frac{\text{GraustufenIntensität des Antigen X} - \text{GraustufenIntensität des CO}}{\text{GraustufenIntensität des RC} - \text{GraustufenIntensität des CO}} * 100$$

- Den Streifenträger aus dem BDI nehmen und die abgearbeiteten Streifen im Streifenträger belassen. Achtung: Die Streifen müssen vollständig trocken sein, bevor Sie mit dem Scanningvorgang beginnen!
- Den Streifenträger mit der reaktiven Seite der Streifen nach unten in die dafür vorgesehene Position des BlueScan-Scanners einlegen.
- Das Scannen der Streifen mit der Dr Dot-Software starten.
- Die Ergebnisse werden von der Software semi-quantifiziert, und die Auswertung der erhaltenen Werte ist wie folgt

| Dr Dot arbiträre | Auswertung |
|------------------|------------|
| < 5              | negativ    |
| 5 – 10           | equivokal  |
| >10              | positiv    |

Detaillierte Informationen über das BlueScan-System und die Dr Dot-Software erhalten Sie im Nutzungshandbuch der Dr Dot-Software

### 10.3 Wichtige Empfehlungen für die Auswertung von Ergebnissen

1. Dieser Kit stellt ein diagnostisches *Hilfsmittel* dar. Folglich kann keine Diagnose allein auf der Basis unserer Kits gestellt werden. Die Ergebnisse sollten immer unter Berücksichtigung der klinischen Untersuchung, der Anamnese des Patienten und der mit anderen Methoden erzielten Ergebnisse interpretiert werden.  
Es gibt leider keine einzige Technik oder Methode, die die Möglichkeit falsch positiver oder falsch negativer Ergebnisse ausschließen kann. Demzufolge muss vor der Verwendung eines BlueDiver Dot Kits möglichst ein *indirekter Immunfluoreszenztest* durchgeführt werden (Immunfluoreszenz ist als Referenzmethode in der Autoimmunität anerkannt).
2. Die Intensität eines Ergebnisses gibt nicht unbedingt den Grad der Intensität der Erkrankung an, sondern vielmehr die Höhe der nachgewiesenen Antikörper.
3. Niedrige Titer von Autoantikörpern können bei gesunden Patienten auftreten. Aus diesem Grund sollten niedrig-positive Ergebnisse (nahe dem CO, zwischen 5 und 10 AU), obgleich gültig, als equivokal (zweideutig) angesehen werden. In solchen Fällen wird ein erneutes Testen des Patienten, vorzugsweise durch Verwendung einer neuen Probe, empfohlen. Wenn das Ergebnis beim erneuten Test immer noch zweideutig sein, müssen andere diagnostische Tests und/oder klinische Informationen verwendet werden, um den autoimmunen Zustand des Patienten zu bestimmen.
4. Aus verschiedenen Gründen, und unter bestimmten Bedingungen kann der Kit einen Leistungsdefekt aufweisen (siehe Fehlersuche). In solchen Fällen sind die Ergebnisse nicht gültig und können nicht ausgewertet werden. Es wird empfohlen, den Test zu wiederholen. Sollte der Fehler weiterhin bestehen, wenden Sie sich bitte an Ihren Verteiler.
5. Die Intensität der Ergebnisse kann abnehmen, wenn der Kit am Ende seiner Lebensdauer verwendet wird. Die Leistung des Kits (Erkennung von positiven und negativen Resultaten) wird jedoch unter normalen Gebrauchs- und Lagerungsbedingungen nicht beeinträchtigt.
6. Sequentielle Probennahmen (zu verschiedenen Zeitpunkten) bei einem Autoimmunpatienten können manchmal, von einer Probe zur anderen, zu unterschiedlichen Ergebnissen führen. Dieser Unterschied kann mehrere Gründe haben: die Behandlung des Patienten, die Entwicklung der Krankheit oder eine Serokonversion. Im speziellen Fall einer Serokonversion kann das Ergebnis in einer frühen Probe des Patienten positiv für einen Autoantikörper sein und in einer späteren Probe desselben Patienten positiv für einen anderen Autoantikörper werden.

### 10.4 Fehlerbehebung

| Problem   | Möglicher Grund + Lösungen   |
|---|--|
| Diskrepanz der Ergebnisse im Vergleich zu einer Referenzmethode                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Verwendung <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fehlerhaftes Pipettieren von Serum</li> <li>- Fehlerhafte Dosiermenge</li> <li>- Verwendung von zwei verschiedenen Proben eines selben Patienten (siehe Punkt 10.3.6) oder falsche Handhabung/Lagerung der Proben zwischen den Tests</li> <li>- Fehlerhafte visuelle Auswertung</li> <li>- Fehlerhafte Dr Dot Ablesung<br/>→ bitte den Test wiederholen</li> </ul> </li> <li>- Material <ul style="list-style-type: none"> <li>- Störende Substanzen in der Probe</li> <li>- Die Probe ist ein Pool aus verschiedenen menschlichen Seren<br/>→ bitte den Test wiederholen und durch andere Methoden bestätigen</li> </ul> </li> <li>- Methode <ul style="list-style-type: none"> <li>- Intrinsische Leistung des Kits (siehe 11.2 Analytische Sensitivität und Spezifität)</li> <li>- Verfallener Kit</li> <li>- Stabilitätsproblem</li> </ul> </li> </ul> <p><b>Bitte kontaktieren Sie Ihren Distributor für weitere technische Supportanfragen.</b></p> |
| Unterschiedliche Ergebnisse in einer gleichen Charge oder zwischen mehreren Chargen - | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Verwendung <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fehlerhaftes Pipettieren von Serum</li> <li>- Fehlerhafte Dosiermenge</li> <li>- Fehlerhafte visuelle Auswertung</li> <li>- Fehlerhafte Dr Dot Ablesung<br/>→ bitte den Test wiederholen</li> </ul> </li> <li>- Methode <ul style="list-style-type: none"> <li>- Intrinsische Leistung des Kits (siehe 11.1 Wiederholbarkeit und Reproduzierbarkeit)</li> </ul> </li> </ul>   |
| Verunreinigung zwischen benachbarten Streifen   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Verwendung <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fehlerhafte Pipettieren von Serum<br/>→ bitte den Test wiederholen</li> <li>- Inkorrekte Vertikalität der Streifen auf dem BDI<br/>→ bitte die Vertikalität korrigieren</li> </ul> </li> </ul> <p><b>Bitte kontaktieren Sie Ihren Distributor für weitere technische Supportanfragen.</b></p>   |
| Schwache (oder fehlende) RC   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Verwendung <ul style="list-style-type: none"> <li>- Serum nicht pipettiert<br/>→ bitte den Test wiederholen</li> <li>- Patient leidet eventuell an IgA-Mangel<br/>→ bitte den Test wiederholen, um den Patientenstatus zu bestätigen</li> <li>- Beschädigte Reagenzien<br/>→ die Integrität der Reagenzien prüfen<br/>→ bitte kontaktieren Sie ihren Verteiler, falls Sie ein Problem vermuten</li> <li>- Dot nicht auf dem Streifen</li> </ul> </li> </ul>   |

|   |   |
|---|---|
|   | → Zählen Sie die Anzahl der Dots auf dem Streifen; falls nicht korrekt, wenden Sie sich an Ihren Lieferanten  |
| CO fehlend  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- beschädigte Reagenzien<br/>→ Überprüfen Sie die Integrität der Reagenzien, kontaktieren Sie Ihren Händler, falls Sie ein Problem vermuten.</li> <li>- Dot fehlt gänzlich auf dem Streifen<br/>→ Zählen Sie die Anzahl der auf dem Streifen vorhandenen Spots, kontaktieren Sie Ihren Händler im Falle einer falschen Anzahl</li> </ul> |
| Unspezifische Bindungen / hoher Hintergrund / hoher CO-Wert | Verdacht auf Anwesenheit einer Kontamination oder einer Störsubstanz in der Patientenprobe<br>→ bitte den Test wiederholen und durch eine andere Methode bestätigen<br><b>Bitte kontaktieren Sie Ihren Distributor für weitere technische Supportanfragen.</b>  |
| Barcode der Streifen oder Kassetten nicht lesbar            | Herstellungsproblem → bitte wenden Sie sich an Ihren Verteiler  |
| Kitinhalt nicht korrekt                                     | Herstellungsproblem → bitte wenden Sie sich an Ihren Verteiler  |
| Alle Ergebnisse auf dem Streifen sind positiv               | Problem mit den Reagenzien → bitte wenden Sie sich an Ihren Verteiler   |

#### HINWEIS:

Die wichtigsten Rest-Risiken des Kits, wie sie in der Risikoanalyse des Kits am Ende des Designs (nach der Abmilderung) angegeben sind, sind wie folgt:

- 1) Risiko auf falsche Ergebnisse aufgrund eines Pipettierfehlers (schlechtes Serum)
- 2) Risiko falscher Ergebnisse aufgrund einer in der Probe enthaltenen Störsubstanz

### 11. LEISTUNGEN

#### 11.1 Wiederholbarkeit und Reproduzierbarkeit

Referenzproben wurden für jeden Antikörper in aufeinanderfolgenden, statistisch repräsentativen Serien getestet, sowohl im selben Test als auch in verschiedenen Tests und zwischen verschiedenen Chargen, um die Intra-Assay-, Inter-Assay- und Inter-Lot-Variationen zu berechnen.

In allen Fällen lagen die Standardabweichungen der Farbintensität innerhalb der folgenden erwarteten Grenzen:

- CV ≤ 10% für Intra-Assay-Läufe
- CV ≤ 15% für Inter-Assay-Läufe
- CV ≤ 20% für Inter-Charge-Läufen

#### 11.2 Analytische Sensitivität

Messbereich (halb-quantifizierte Ergebnisse): Von 0 AU (negativ) bis 100 AU (hoch positiv).

Nachweisgrenze: Der niedrigste gemessene Wert des Tests beträgt 5 AU (gilt als mehrdeutig gemäß dem Interpretationsalgorithmus, siehe Punkt 10.2).

Da es für die Autoantikörper keine internationale Norm gibt, sind Messgenauigkeit und Linearität bei diesem Produkt nicht anwendbar.

#### 11.3 Analytische Spezifität

1. Die wichtigsten bekannten Störsubstanzen wurden an jedem Biomarker dieses Kits getestet. Bei jeder getesteten Konzentration der Störsubstanz betrug die Differenz zwischen dem Ergebnis der Probe ohne die Störsubstanz im Verhältnis zum Ergebnis der Probe mit der Störsubstanz nicht mehr als 15%.

| Störsubstanz     | Höchstkonzentration | Zwischenkonzentration | Mindestkonzentration | Differenz <15% |
|------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|----------------|
| Bilirubin        | 100 mg/dL           | 50 mg/dL              | 25 mg/dL             | Yes            |
| Hämoglobin       | 200 mg/dL           | 100 mg/dL             | 50 mg/dL             | Yes            |
| Cholesterin      | 224.3 mg/dL         | 112 mg/dL             | 56 mg/dL             | Yes            |
| Rheumafaktor IgM | ~500IU/ml           | ~300IU/ml             | ~100IU/ml            | Yes            |

Hinweis: Es ist unmöglich, alle in der Literatur beschriebenen möglichen Störsubstanzen zu testen. Andere Interferenzen, u.a. arzneimittelinduzierte Störungen, sind möglich.

2. Die hohe analytische Spezifität des Tests wird durch die Qualität des verwendeten Antigens gewährleistet. Dieser Kit weist IgG-Antikörper gegen Scl-70, CENP-A, CENP-B, PM-Scl 100, PM-Scl 75, Ku, RNA Polymerase III, RNP 68kD/A/C, Th/To und Fibrillarin nach. Es wurden keine Kreuzreaktionen mit anderen Biomarkern festgestellt.

#### 11.4 Klinische Sensitivität und Spezifität

Charakteristische Proben (durch Referenzlaboratorien und/oder -methoden bestätigte positive oder negative Proben der jeweiligen Antikörper) wurden entsprechend der Arbeitsanleitung getestet. Sensitivität und Spezifität wurden anhand der Ergebnisse externer Leistungsbewertungen und EQA-Kontrollprogramme berechnet. Ein ausführlicher klinischer Bericht ist auf Anfrage erhältlich.

Leistungsbewertungen und EOT-Kontrollprogramme berechnet. Ein ausserordentlicher klinischer Bericht ist auf Anfrage erhältlich.

| <u>Scl-70</u>         |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| +                     | -                          |
| richtig positiv<br>18 | falsch positiv<br>0        |
| falsch negativ<br>0   | richtig negativ<br>272     |
| Sensitivität          | $\frac{18}{18} = > 99\%$   |
| Spezifität            | $\frac{272}{272} = > 99\%$ |

| <u>CENP-A</u>         |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| +                     | -                        |
| richtig positiv<br>24 | falsch positiv<br>3      |
| falsch negativ<br>0   | richtig negativ<br>286   |
| Sensitivität          | $\frac{24}{24} = > 99\%$ |
| Spezifität            | $\frac{286}{289} = 99\%$ |

| <u>CENP-B</u>         |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| +                     | -                        |
| richtig positiv<br>24 | falsch positiv<br>3      |
| falsch negativ<br>0   | richtig negativ<br>205   |
| Sensitivität          | $\frac{24}{24} = > 99\%$ |
| Spezifität            | $\frac{205}{208} = 99\%$ |

| <u>PM-Scl 100</u>    |                          |
|----------------------|--------------------------|
| +                    | -                        |
| richtig positiv<br>7 | falsch positiv<br>0      |
| falsch negativ<br>0  | richtig negativ<br>68    |
| Sensitivität         | $\frac{7}{7} = > 99\%$   |
| Spezifität           | $\frac{68}{68} = > 99\%$ |



|  |                               |   |                             |                            |                            |                              |   |   |   |                              |                            |                            |                              |  |   |   |                             |                            |                            |                              |   |   |   |                              |                            |                            |                               |
|--|-------------------------------|---|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------|---|---|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------|--|---|---|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------|---|---|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| <p><b><u>PM-ScI 75</u></b></p> <table><tr><td>+</td><td>-</td></tr><tr><td>richtig positiv<br/><b>1</b></td><td>falsch positiv<br/><b>0</b></td></tr><tr><td>falsch negativ<br/><b>0</b></td><td>richtig negativ<br/><b>38</b></td></tr></table> <p><b>Sensitivität</b> <math>\frac{1}{1} = &gt; 99\%</math></p> <p><b>Spezifität</b> <math>\frac{38}{38} = &gt; 99\%</math></p> | +                             | - | richtig positiv<br><b>1</b> | falsch positiv<br><b>0</b> | falsch negativ<br><b>0</b> | richtig negativ<br><b>38</b> | <p><b><u>Ku</u></b></p> <table><tr><td>+</td><td>-</td></tr><tr><td>richtig positiv<br/><b>3</b></td><td>falsch positiv<br/><b>0</b></td></tr><tr><td>falsch negativ<br/><b>0</b></td><td>richtig negativ<br/><b>36</b></td></tr></table> <p><b>Sensitivität</b> <math>\frac{3}{3} = &gt; 99\%</math></p> <p><b>Spezifität</b> <math>\frac{36}{36} = &gt; 99\%</math></p>             | + | - | richtig positiv<br><b>3</b>  | falsch positiv<br><b>0</b> | falsch negativ<br><b>0</b> | richtig negativ<br><b>36</b> | <p><b><u>RNA Polymerase III</u></b></p> <table><tr><td>+</td><td>-</td></tr><tr><td>richtig positiv<br/><b>6</b></td><td>falsch positiv<br/><b>0</b></td></tr><tr><td>falsch negativ<br/><b>1</b></td><td>richtig negativ<br/><b>56</b></td></tr></table> <p><b>Sensitivität</b> <math>\frac{6}{7} = 86\%</math></p> <p><b>Spezifität</b> <math>\frac{56}{56} = &gt; 99\%</math></p> | + | - | richtig positiv<br><b>6</b> | falsch positiv<br><b>0</b> | falsch negativ<br><b>1</b> | richtig negativ<br><b>56</b> | <p><b><u>RNP 68kD/A/C</u></b></p> <table><tr><td>+</td><td>-</td></tr><tr><td>richtig positiv<br/><b>40</b></td><td>falsch positiv<br/><b>5</b></td></tr><tr><td>falsch negativ<br/><b>2</b></td><td>richtig negativ<br/><b>218</b></td></tr></table> <p><b>Sensitivität</b> <math>\frac{40}{42} = 95\%</math></p> <p><b>Spezifität</b> <math>\frac{218}{223} = 98\%</math></p> | + | - | richtig positiv<br><b>40</b> | falsch positiv<br><b>5</b> | falsch negativ<br><b>2</b> | richtig negativ<br><b>218</b> |
| +  | -                             |   |                             |                            |                            |                              |   |   |   |                              |                            |                            |                              |  |   |   |                             |                            |                            |                              |   |   |   |                              |                            |                            |                               |
| richtig positiv<br><b>1</b>  | falsch positiv<br><b>0</b>    |   |                             |                            |                            |                              |   |   |   |                              |                            |                            |                              |  |   |   |                             |                            |                            |                              |   |   |   |                              |                            |                            |                               |
| falsch negativ<br><b>0</b>   | richtig negativ<br><b>38</b>  |   |                             |                            |                            |                              |   |   |   |                              |                            |                            |                              |  |   |   |                             |                            |                            |                              |   |   |   |                              |                            |                            |                               |
| +  | -                             |   |                             |                            |                            |                              |   |   |   |                              |                            |                            |                              |  |   |   |                             |                            |                            |                              |   |   |   |                              |                            |                            |                               |
| richtig positiv<br><b>3</b>  | falsch positiv<br><b>0</b>    |   |                             |                            |                            |                              |   |   |   |                              |                            |                            |                              |  |   |   |                             |                            |                            |                              |   |   |   |                              |                            |                            |                               |
| falsch negativ<br><b>0</b>   | richtig negativ<br><b>36</b>  |   |                             |                            |                            |                              |   |   |   |                              |                            |                            |                              |  |   |   |                             |                            |                            |                              |   |   |   |                              |                            |                            |                               |
| +  | -                             |   |                             |                            |                            |                              |   |   |   |                              |                            |                            |                              |  |   |   |                             |                            |                            |                              |   |   |   |                              |                            |                            |                               |
| richtig positiv<br><b>6</b>  | falsch positiv<br><b>0</b>    |   |                             |                            |                            |                              |   |   |   |                              |                            |                            |                              |  |   |   |                             |                            |                            |                              |   |   |   |                              |                            |                            |                               |
| falsch negativ<br><b>1</b>   | richtig negativ<br><b>56</b>  |   |                             |                            |                            |                              |   |   |   |                              |                            |                            |                              |  |   |   |                             |                            |                            |                              |   |   |   |                              |                            |                            |                               |
| +  | -                             |   |                             |                            |                            |                              |   |   |   |                              |                            |                            |                              |  |   |   |                             |                            |                            |                              |   |   |   |                              |                            |                            |                               |
| richtig positiv<br><b>40</b>   | falsch positiv<br><b>5</b>    |   |                             |                            |                            |                              |   |   |   |                              |                            |                            |                              |  |   |   |                             |                            |                            |                              |   |   |   |                              |                            |                            |                               |
| falsch negativ<br><b>2</b>   | richtig negativ<br><b>218</b> |   |                             |                            |                            |                              |   |   |   |                              |                            |                            |                              |  |   |   |                             |                            |                            |                              |   |   |   |                              |                            |                            |                               |
| <p><b><u>Th/To</u></b></p> <table><tr><td>+</td><td>-</td></tr><tr><td>richtig positiv<br/><b>5</b></td><td>falsch positiv<br/><b>0</b></td></tr><tr><td>falsch negativ<br/><b>0</b></td><td>richtig negativ<br/><b>19</b></td></tr></table> <p><b>Sensitivität</b> <math>\frac{5}{5} = 89\%</math></p> <p><b>Spezifität</b> <math>\frac{19}{19} = &gt; 99\%</math></p>          | +                             | - | richtig positiv<br><b>5</b> | falsch positiv<br><b>0</b> | falsch negativ<br><b>0</b> | richtig negativ<br><b>19</b> | <p><b><u>Fibrillarin</u></b></p> <table><tr><td>+</td><td>-</td></tr><tr><td>richtig positiv<br/><b>21</b></td><td>falsch positiv<br/><b>0</b></td></tr><tr><td>falsch negativ<br/><b>0</b></td><td>richtig negativ<br/><b>62</b></td></tr></table> <p><b>Sensitivität</b> <math>\frac{21}{21} = &gt; 99\%</math></p> <p><b>Spezifität</b> <math>\frac{62}{62} = &gt; 99\%</math></p> | + | - | richtig positiv<br><b>21</b> | falsch positiv<br><b>0</b> | falsch negativ<br><b>0</b> | richtig negativ<br><b>62</b> | <p>Hinweis: Sensitivitäts- und Spezifitätswerte von 100 % beziehen sich ausschließlich auf die in klinischen Bewertungen verwendeten Probenkohorten (daher &gt;99%).</p>   |   |   |                             |                            |                            |                              |   |   |   |                              |                            |                            |                               |
| +  | -                             |   |                             |                            |                            |                              |   |   |   |                              |                            |                            |                              |  |   |   |                             |                            |                            |                              |   |   |   |                              |                            |                            |                               |
| richtig positiv<br><b>5</b>  | falsch positiv<br><b>0</b>    |   |                             |                            |                            |                              |   |   |   |                              |                            |                            |                              |  |   |   |                             |                            |                            |                              |   |   |   |                              |                            |                            |                               |
| falsch negativ<br><b>0</b>   | richtig negativ<br><b>19</b>  |   |                             |                            |                            |                              |   |   |   |                              |                            |                            |                              |  |   |   |                             |                            |                            |                              |   |   |   |                              |                            |                            |                               |
| +  | -                             |   |                             |                            |                            |                              |   |   |   |                              |                            |                            |                              |  |   |   |                             |                            |                            |                              |   |   |   |                              |                            |                            |                               |
| richtig positiv<br><b>21</b>   | falsch positiv<br><b>0</b>    |   |                             |                            |                            |                              |   |   |   |                              |                            |                            |                              |  |   |   |                             |                            |                            |                              |   |   |   |                              |                            |                            |                               |
| falsch negativ<br><b>0</b>   | richtig negativ<br><b>62</b>  |   |                             |                            |                            |                              |   |   |   |                              |                            |                            |                              |  |   |   |                             |                            |                            |                              |   |   |   |                              |                            |                            |                               |

### 11.5 Diagnostische Werte der Autoantikörper

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Anti-Scl-70             | Diagnostischer Marker für systemische Sklerodermie (SSc)<br>Diagnostische Spezifität von 99% für systemische Sklerodermie (SSc)<br>Diagnostische Sensitivität von 10% für limitierte SSc (CREST-Syndrom) und bis zu 65% für diffuse SSc   |
| Anti-CENPA              | Diagnostischer Marker für Sklerodermie. Sensitivität von 57-82% für → die limitierte Form von Sklerodermie und 3-12% für die diffuse Form von Sklerodermie.<br>Zu finden bei 10-30% der Patienten mit primär biliärer Cholangitis (PBC).  |
| Anti-CENP-B             | Diagnostischer Marker für Sklerodermie. Sensitivität von 57-82% für → die limitierte Form von Sklerodermie und 3-12% für die diffuse Form von Sklerodermie.<br>Zu finden bei 10-30% der Patienten mit primär biliärer Cholangitis (PBC).  |
| Anti-PM-Scl 100         | Diagnostischer Marker für Bindegewebserkrankungen mit Myositis und Symptomen der systemischen Sklerodermie (SSc).<br>Diagnostische Spezifität von 50-70% für Polymyositis/Skleroderma-Überlappungssyndrom, 20% für idiopathische Myositis und 10% für systemische Sklerodermie (SSc).<br>Diagnostische Sensitivität von 24-55% für Polymyositis/Skleroderma-Überlappungssyndrom, 8-12% für idiopathische Myositis und 1-16% für systemische Sklerodermie (SSc). |
| Anti-PM-Scl 75          | Häufiger gefunden als PM-Scl 100.<br>Kann in Abwesenheit von PM-Scl 100 nachgewiesen werden (67% der Fälle von systemischer Sklerodermie diffuser Form).  |
| Anti-Ku                 | - nachgewiesen bei 23% der Patienten mit "primärer" pulmonaler Hypertonie.<br>- nachgewiesen bei 1,8 bis 23% der Patienten mit systemischem Lupus erythematoses (SLE).<br>- nachgewiesen bei 1,2 bis 14 % der Patienten mit systemischer Sklerose (SSc).<br>- nachgewiesen bei 2 à 33% der Patienten mit einem Überlappungssyndrom mit Myositis.  |
| Anti-RNA-Polymerase III | Diagnostische Spezifität von 98-100% für Systemische Sklerose (SSc)   |
| Anti-RNP 68/A/C         | Diagnostisches Kriterium von Mischkollagenose (Mixed connective tissue disease/MCTD).<br>Hochspezifisch und extrem sensitiv (100%) in Abwesenheit von Sm und dsDNA-Antikörpern.<br>- zu finden bei 13 bis 32 % der Patienten mit Systemischem Lupus erythematoses<br>- zu finden bei 10 % der Patienten mit systemischer Sklerose (SSc)   |
| Anti-Th/To              | Marker der systemischen Sklerodermie (SSc).<br>Nachweisbar bei 4-13% der Patienten mit Sklerodermie, häufiger in der limitiert kutanen (auf die Haut begrenzte) Form anzutreffen.<br>Auch bei Raynaud-Syndrom und idiopathischer Lungenfibrose nachweisbar.   |
| Anti-Fibrillarin        | Diagnostischer Marker für systemische Sklerodermie (SSc), nachgewiesen in 4-22% der Fälle.<br>Prognostischer Marker, assoziiert mit einem hohen Risiko für pulmonale Hypertonie.<br>Marker für den Nachweis von Xenobiotika-Aussetzung.   |

### Literaturreferenzen

- 1: Mejia Otero C, Assassi S, Hudson M, Mayes MD, Estrada-Y-Martin R, Pedroza C, Mills TW, Walker J, Baron M, Stevens W, Proudman SM, Nikpour M, Mehra S, Wang M, Fritzler MJ; Canadian Scleroderma Research Group; Australian Scleroderma Cohort Study; Genetics versus Environment in Scleroderma Outcome Study. Antifibrillarin Antibodies Are Associated with Native North American Ethnicity and Poorer Survival in Systemic Sclerosis. J Rheumatol. 2017 Jun;44(6):799-805. doi: 10.3899/jrheum.160574. Epub 2017 Apr 1. PMID: 28365584; PMCID: PMC5457664.
- 2: Hudson M, Pope J, Mahler M, Tatibouet S, Steele R, Baron M; Canadian Scleroderma Research Group (CSRG), Fritzler MJ. Clinical significance of antibodies to Ro52/TRIM21 in systemic sclerosis. Arthritis Res Ther. 2012 Mar 6;14(2):R50. doi: 10.1186/ar3763. PMID: 22394602; PMCID: PMC3446416.
- 3: Mierau R, Moynadeh P, Riemekasten G, Melchers I, Meurer M, Reichenberger F, Buslau M, Worm M, Blank N, Hein R, Müller-Ladner U, Kuhn A, Sunderkötter C, Juche A, Pfeiffer C, Fiehn C, Sticherling M, Lehmann P, Stadler R, Schulze-Lohoff E, Seitz C, Foeldvari I, Krieg T, Genth E, Hunzelmann N. Frequency of disease-associated and other nuclear autoantibodies in patients of the German Network for Systemic Scleroderma: correlation with characteristic clinical features. Arthritis Res Ther. 2011;13(5):R172. doi: 10.1186/ar3495. Epub 2011 Oct 21. PMID: 22018289; PMCID: PMC3308107.

- 4: Jeong S, Hwang H, Roh J, Shim JE, Kim J, Kim GT, Tag HS, Kim HS. Evaluation of an Automated Screening Assay, Compared to Indirect Immunofluorescence, an Extractable Nuclear Antigen Assay, and a Line Immunoassay in a Large Cohort of Asian Patients with Antinuclear Antibody-Associated Rheumatoid Diseases: A Multicenter Retrospective Study. *J Immunol Res.* 2018 May 2;2018:9094217. doi: 10.1155/2018/9094217. PMID: 29854849; PMCID: PMC5954951.
- 5: Ceribelli A, Krzyszcak ME, Li Y, Ross SJ, Chan JY, Chan EK, Burlingame RW, Webb TT, Bubb MR, Sobel ES, Reeves WH, Satoh M. Atypical clinical presentation of a subset of patients with anti-RNA polymerase III--non-scleroderma cases associated with dominant RNA polymerase I reactivity and nucleolar staining. *Arthritis Res Ther.* 2011 Jul 22;13(4):R119. doi: 10.1186/ar3422. PMID: 21781293; PMCID: PMC3239357.
- 6: Karsten Conrad, Werner Schössler, Falk Hiepe, Marvin J. Fritzler, Book "Autoantibodies in systemic Autoimmune Diseases", Volume 2, third edition – 2015.

## 12. TESTEINSCHRÄNKUNGEN

1. Die mit diesem Bestätigungstest erzielten Ergebnisse hängen von der intrinsischen Leistung des Kits ab und müssen als Hilfsmittel für die endgültige Diagnose betrachtet werden, wobei die mit einer Referenztechnik erzielten Ergebnisse und die klinischen Daten des Patienten berücksichtigt werden müssen.
2. Hyperlipämischen Proben müssen zuerst zentrifugiert werden, bevor eine 10 µl Probe (aus dem Überstand) pipettiert werden kann.

Version C CORR1  
Letzte Überholung: 05/2023





We Apply Science



We Apply Science